


Maintenance Défibrillateur



LIFEPAK® CR Plus



Pictogrammes >

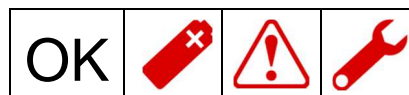

Ecran Etat de Fonctionnement : « 4 ***INDICATEURS** »

Ecran **D**ate de **P**éremption kit « **P**ile / **E**lectrodes »

sur l'Ecran de l'Etat de Fonctionnement :
4 **P**ictogrammes peuvent apparaître lorsque l'appareil est éteint, en mode de fonctionnement « veille active »

L'affichage de ces **P**ictogrammes indique que :

1. le défibrillateur fonctionne parfaitement
2. le défibrillateur a besoin d'entretien

Le bouton « **ON / OFF** » permet de soulever le couvercle et de mettre le défibrillateur en Marche. Pour éteindre l'appareil, Appuyer « 2 secondes / 3 bips » sur le bouton « **ON / OFF** »

Fonctionnalité des 4 ***INDICATEURS** - « Interprétation des Pictogrammes » :

OK Indicateur « **OK** » affiché ⇒ Appareil en **Parfait Etat de Fonctionnement**



Indicateur « **CHARGE-PAK** » apparaît SI :

- le Chargeur de Pile « Charge-Pak » a besoin d'être remplacé « en cas d'Urgence, le défibrillateur peut être utilisé en l'état »
- ou que le Chargeur de Pile « Charge-Pak » n'est pas ou mal installé



Indicateur « **ATTENTION** » apparaît SI :

- la Pile interne n'est pas entièrement chargée
- Dès que cet indicateur apparaît, la Pile interne dispose d'une énergie suffisante pour délivrer 6 chocs (minimum) de 360 Joules ou pour fonctionner 42 minutes



Indicateur « **CLE** » apparaît SI :

- une situation empêche le défibrillateur de fonctionner normalement
- ou pourrait empêcher le défibrillateur de fonctionner normalement

Il est également **Recommandé** de **Contrôler** régulièrement l' **Etat Extérieur** de l'**A**ppareil
Informations disponibles dans la notice d'instruction de l'appareil (Mode d'emploi – Page 22)
Tout élément endommagé, usagé ou expiré doit être impérativement remplacé

➔ Dysfonctionnement du DAE : seul **PHYSIO-CONTROL** est habilité à dépanner votre appareil



SERVICESECOM

Solutions Technico-Médicales

Tél. : 09 61 45 61 95

web : www.servicesecon.fr